

מיוצר עבור פרמה קייר אירופה ווסט
RH109NQ UK קס000

יצרן: ביו טק סולושיין לטד. ווינדמיל
וורקס, קליטרופר אינדסטיאל אסקייפ,
דריפילד, YO259DJ בריטניה

יבואן: פרמה גורי בע"מ גיבורי ישראל 44
נתניה

שירות לקוחות בימים א'-ה' 9:00-15:00
בטל': 1-800-500-000

טל' בעל הרישום: 09-8866999
רישיון אמ"ר מספר 13290404

Promensil Cooling

Spray for menopause for women during the early stages and throughout menopause

Promensil Cooling Spray provides instant relief from hot flushes and night sweats. This gentle clinically tested cooling spray draws heat away from the skin, quickly and effectively reducing skin temperature and redness.

A safe, easy way to treat hot flushes and night sweats

75 ml

Ingredients: water, Ethanol, Polysorbate20, Glycerin, Menthol, Peppermint Oil, Trifolium, Pratense (Red Clover) Extract, Methylparaben, Propylparaben, Imidazolidinyl Urea

פרומנסיל ספריי לקירור, לגיל המעבר, לנשים בשלבים ראשונים ובמהלך גיל המעבר.

פרומנסיל ספריי לקירור, מספק הקלה מהירה מגלי חום והזעת לילה.

ספריי עדין זה נחקר קלינית כמרחיק את החום מהעור וכך במהירות וביעילות מפחית את הטמפרטורה והאדמומיות.

דרך יעילה ובטוחה לטפל בגלי חום ובהזעה לילית

75 מ"ל

אופן שימוש:

בזמן גלי החום והזעת יתר, יש להתיז את הספריי על אזור הצוואר והחזה יש לאפשר לחומר להתנדף ולקרר. לתוצאות טובות, יש להשאיר את אזור ההתזה חשוף ולחזור על פעולת ההתזה לפי הצורך.

אביזר רפואי קלאס 1

אזהרות מיוחדות:

לשימוש חיצוני בלבד

לא להשתמש על עור פגוע

לא להתיז לעיניים או לפה.

יש לעצום את העיניים אם משתמשים בספריי לקרר את הפנים. במקרה של בליעה או מגע עם העיניים, יש לשטוף עם הרבה מים ואם יש צורך לפנות לעזרה רפואית

يقوم بشكل سريع وفعال بالحد من درجات الحرارة والاحمرار.

طريقة فعالة وآمنة لعلاج الهبات الساخنة والتعرق الليلي

٧٥ ملم

طريقة الاستخدام:

أثناء الهبات الساخنة والتعرق الشديد قم برش المنتج على منطقة الرقبة والصدر واتركه حتى يتبخر ويبرد.

للحصول على نتائج جيدة يرجى ترك منطقة الرش مكشوفة وتكرار العملية بحسب الحاجة.

ملحق طبي من الفئة ١

تحذيرات خاصة:

لاستعمال الخارجي فقط

لا تقم باستخدامه على الجلد المتضرر

لا تقم بالرش على العينين أو الفم

يجب إغلاق العينين في حال كنت تستخدم البخاخ لتبريد الوجه

في حال البلع أو ملامسة العينين توجه للمساعدة الطبية فوراً

صنع من أجل شركة فارم كير، أوروبا، بريطانيا RH1٠٩NQ، غرب ساسكس

المصنع: شركة بيو تيك سليوشنز المحدودة.

ويندميل ووركس، كالكيتروبر إندستريال إسكاي، دريفيلد، بريطانيا J٧٠٢٥٩D

المستورد: شركة فارما جوري محدودة الضمان، جيوري إسرائيل ٤٤، نتانيا

Directions of use:

Spray the chest and neck area and allow spray to evaporate and cool. For best results leave skin uncovered and re-apply as needed
Class 1 medical device

Special precaution:

For external use only

Do not use on broken skin

Do not apply to eyes or mouth

Close eyes if using spray to cool the face

If swallowed or in contact with eyes seek medical assistance immediately

Manufactured for PharmCare Europe West Sussex RH109NQ,UK

Manufacturer: Bio tech Solutions Ltd

Windmill Works, Kelleythrope industrial Estate, Kelleythrope, Driffield, YO25 9DJ, United Kingdom

Importer: Pharma Guri ltd Giborei Israel 44 Netanya

Medical device no. 13290404

بخاخ برومنسيل كولينج سبراي لانقطاع الطمث

وللنساء في المراحل الأولى وخلال سن اليأس.

يمنح برومنسيل كولينج سبراي راحة فورية من الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

ويقوم هذا البخاخ اللطيف والمفحوص سريريا بإبعاد الحرارة عن الجلد، وبالتالي